

# LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES CON SOSPECHA DE INFECCIÓN POR CORONAVIRUS

Las recomendaciones a seguir según el material son las siguientes:

## Material desechable



### CONOS DE OTOSCOPIO

- Son de un solo uso.
- No deben ser reutilizados.

## Material que necesita limpieza:



### ESFIGMOMANÓMETRO

- La parte textil debe lavarse con agua y detergente enzimático.
- El manómetro y las gomas se limpian cuidadosamente con un trapo humedecido con agua y detergente enzimático.



### OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO

- Se limpian cuidadosamente con un trapo humedecido con agua y detergente enzimático.

## Material que necesita limpieza y desinfección de nivel medio:




### ESTETOSCOPIO

- Se limpia con un trapo humedecido con agua y detergente enzimático (fundamentalmente la membrana y los auriculares) y se seca.
- Se desinfecta con alcohol de 70° la membrana de contacto.



### TERMÓMETRO

- Se limpia con agua fría y detergente enzimático.
- Se desinfecta con alcohol de 70°.
- Se guarda limpio y seco.

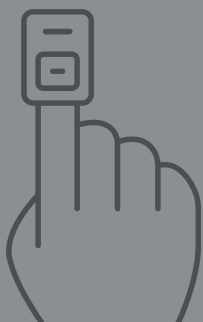

### PULSIOXÍMETRO

- Limpiar el aparato con detergente enzimático, aclarar con gasa humedecida en agua y secar por completo.
- Transductor: limpiar con detergente enzimático y secar; después desinfectar con gasa humedecida con alcohol 70°.